

## 1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Приступая к эксплуатации Инъекционного дротика (изделия), внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками и правилами эксплуатации.
- 1.2. Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.
- 1.3. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ


- 2.1. Дротик дистанционный инъекционный «ИД-02», заправляемый жидким фармпрепаратом (далее «ИД-02»), предназначен для отлова и иммобилизации диких и бездомных бродячих животных.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Габаритные размеры мм:

- длина	80
- диаметр	4,5

- 3.2. Масса г, не более 1,5

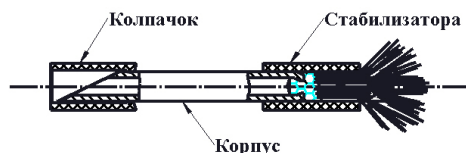

- 3.3. Количество раствора фармпрепарата, доставляемого к цели, до 0,2 мл.
- 3.4. Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного иньектора и подготовкой стрелка.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Выталкивание «ИД-02» из канала ствола производится за счет энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного иньектора.
- 4.2. При попадании «ИД-02» в мышечную ткань животного происходит впрыск усыпляющего фармпрепарата (игла дротика прорезает колпачок, он сдвигается по игле).

## 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции изделие «ИД-02» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в эксплуатации.
- 5.2. Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-02» при нахождении людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия дистанционного иньектора. Максимальная дальность стрельбы определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями «ИД-02» из используемого дистанционного иньектора.

- 5.3. Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию изделия и правила обращения с ним.

## 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 6.1. Снаряжение изделия «ИД-02» фармакологическим препаратом производится с использованием шприца, в следующей последовательности:

- приготовить 90% раствор фармпрепарата «АДИЛИН-СУПЕР» (90%-раствор-это 1,8 гр. порошка Адилена-Супер и 0,5 гр. воды, при температуре окружающей среды ниже 0° С в качестве растворителя используют 20-45% водные растворы этиленгликоля (ГОСТ 10164-75) или полигликоля (ТУ 6-01-10-40-79))

- снять колпачок с носовой части дротика;

- при помощи шприца с приготовленным раствором фармпрепарата, залить в полость корпуса дротика 0,2мл;

- надеть колпачок на носовую часть дротика;

Изделие готово к применению.

**При заправке дротика в дистанционный иньектор используйте шомпол – досылатель, чтобы шерстяной стабилизатор был полностью в стволе иньектора.**

- 6.2. Допускается повторное использование изделия «ИД-02» при наличии запасных колпачков и после предварительной дезинфекции (промыть изделие и замачивания 5-6 часов в 7% растворе монохлорамина или других дезинфицирующих средствах).

## 7. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

- 7.1. Эффективная дальность применения изделия «ИД-02» (вероятность попадания на 90% зависит от навыков стрелка) определяется типом используемого дистанционного иньектора и составляет, например для МР-512 до 20 метров, при использовании более мощных дистанционных иньекторов дальность применения может быть увеличена.
- 7.2. Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач, разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия «ИД-02» в эксплуатацию.
- 7.3. За применение изделий не по назначению или в условиях не определенных в паспорте, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 8.1. Нетоксично
- 8.2. Номер партии
- 8.3. Дата изготовления 2016 г.
- 8.4. Гарантийный срок хранения: 5 лет.
- 8.5. Не подлежит обязательной сертификации.