

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Приступая к эксплуатации изделия, внимательно изучите паспорт и инструкцию по эксплуатации.
- 1.2. Замечание по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.
- 1.3. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в инструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном издании.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Инъекционный дротик «ИД-04» предназначен для иммобилизации диких и бездомных, бродячих животных.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. габаритные размеры мм:
 - длина 60
 - диаметр 4,5
- 3.2. Масса г. не более 1,5
- 3.3. Количество пасты фармпрепарата, доставляемого к цели, до 0,5 г.
- 3.4. Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного иньектора и подготовкой стрелка.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Выталкивание «ИД-05» из канала ствола производится за счет энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного иньектора.
- 4.2. При попадании дротика в тело животного, происходит вымывание кровью фармпрепарата из дротика.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.3. При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции изделие «ИД-04» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в эксплуатации.
- 4.4. Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-04» при нахождении людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия метательного устройства. Максимальная дальность стрельбы определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями «ИД-04» из используемого дистанционного иньектора.
- 4.5. Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию изделия и правила обращения с ним.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 5.1. Снаряжение изделия «ИД-04» фармакологическим препаратом производится с использованием специального, отдельно поставляемого комплекта. В следующей последовательности:
 - берется 80% глюкоза или приготавливается сахарный раствор (1 часть воды + 4 части сахара, перед смешиванием подогреть воду до 80-95 С)
 - на стекле для замешивания используя порошок фармпрепарата и сахарный сироп или глюкозу, с помощью шпателя приготавливают густую пасту
 - с помощью штопфер-гладилки закладывают пасту в дротик
 - дают 10- 15 минут на подсыхание пастыИзделие готово к применению.
- 5.2. Допускается повторное использование изделия «ИД-04» в случае отсутствия механических повреждений его частей и после предварительной дезинфекции (промывка изделия и замачивания 5-6 часов в 7% растворе монохлорамина или других дезинфицирующих средствах).

6. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

- 6.1. Эффективная дальность применения изделия «ИД-04» (вероятность попадания на 90% зависит от навыков стрелка) определяется типом используемого дистанционного иньектора и составляет, например для ИЖ-53 до 10 метров, для МР-512 до 20 метров, при использовании более мощных дистанционных иньекторов дальность применения может быть увеличена.
- 6.2. Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач, разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия в эксплуатацию.
- 6.3. За применение изделий не по назначению или в условиях не определенных в паспорте, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 8.1. Нетоксично
- 8.2. Номер партии
- 8.3. Дата изготовления: 2016 г.
- 8.4. Гарантийный срок хранения: 5 лет.
- 8.5. Не подлежит обязательной сертификации.