

## **1. ВЕДЕНИЕ**

- 1.1. Приступая к эксплуатации изделия, внимательно изучите паспорт и инструкцию по эксплуатации.
- 1.2. Замечание по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.
- 1.3. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в инструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном издании.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ**

- 2.1. Инъекционный дротик «ИД-06» предназначен для иммобилизации диких и бродячих животных.

## **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 3.1. габаритные размеры мм:
  - длина 40
  - диаметр 4,5
- 3.2. Масса г, не более 1,5
- 3.3. Количество пасты фармпрепарата, доставляемого к цели, до 0,5 г.
- 3.4. Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного иньектора и подготовкой стрелка.

## **4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Выталкивание «ИД-06» из канала ствола производится за счет энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного иньектора.
- 4.2. При попадании в тело животного дротик прорезает и входит в мышечную ткань, кровью происходит вымывание фармпрепарата из дротика.

## **5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции изделие «ИД-06» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в эксплуатации.
- 5.2. Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-06» при нахождении людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия дистанционного иньектора. Максимальная дальность стрельбы определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями «ИД-06», из используемого дистанционного иньектора.
- 5.3. Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию изделия и правила обращения с ним.

## **6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

- 6.1. Снаряжение изделия «ИД-06» фармакологическим препаратом производится с использованием специального, отдельно поставляемого комплекта в следующей последовательности:
  - берется 80% глюкоза или приготавливается сахарный раствор (1 часть воды + 4 части сахара, перед смешиванием подогреть воду до 80-95 С);
  - на стекле для замешивания используя порошок фармпрепарата и сахарный сироп или глюкозу, с помощью шпателя приготавливают густую пасту;
  - с помощью штопфер-гладилки закладывают пасту в дротик;
  - дают 10- 15 минут на подсыхание пасты.Изделие готово к применению.
- 6.2. Допускается повторное использование изделия «ИД-06» в случае отсутствия механических повреждений его частей и после предварительной дезинфекции (промывка изделия и замачивания 5-6 часов в 7% растворе монохлорамина или других дезинфицирующих средствах).

## **7. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ**

- 7.1. Эффективная дальность применения изделия «ИД-06» (вероятность попадания на 90% зависит от навыков стрелка) определяется типом используемого дистанционного иньектора и составляет, например, для ИЖ-53, SW до 10 метров, для МР-512 до 20 метров, при использовании более мощного дистанционного иньектора дальность применения может быть увеличена.
- 7.2. Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач, разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия в эксплуатацию.
- 7.3. За применение изделий не по назначению или в условиях не определенных в паспорте, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## **8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 8.1. Нетоксично
- 8.2. Номер партии
- 8.3. Дата изготовления: 2016 г.
- 8.4. Гарантийный срок хранения: 5 лет.
- 8.5. Не подлежит обязательной сертификации.