

ВНИМАНИЕ!

Изделие «Дистанционный иньектор SW» предназначено для стрельбы инъекционными дротиками ИД-06 (калибр 4,5 мм).

Перед использованием изделия внимательно и полностью прочитайте инструкцию.

Данное изделие относится к средствам ветеринарии и не подлежит сертификации.

Всегда обращайтесь с изделием, как будто оно заряжено.

Тщательно соблюдайте все меры безопасности, описанные в инструкции

Следует регулярно проверять надежность крепления элементов конструкции и при необходимости затягивать крепежные винты.

Запрещается:

- целиться и стрелять в людей;
- направлять изделие на себя или в сторону других людей;
- транспортировать или хранить изделие со снаряженным магазином (инъекционными дротиками);
- снимать изделие с предохранителя и держать палец на спусковом крючке до полной готовности к стрельбе;
- оставлять заряженное изделие без присмотра.

Устройство:



1. Сдвижная накладка рукоятки;
2. Спусковой крючок;
3. Предохранитель/кнопка открывания барабана;
4. Барабан;
5. Курок;
6. Прицельная планка с целиком;
7. Мушка;
8. Фальшпатрон-6 шт.;
9. ускоритель заряжания.

Подготовка к стрельбе.

1. Поставить изделие на предохранитель и снять накладку рукояти (1);
2. Выкрутить прижимной винт, находящийся в нижней части рукояти;
3. Установить баллон в рукоять до упора;
4. Закрутить прижимной винт;
5. Установить накладку рукояти в первоначальное положение;
6. Поставить изделие на предохранитель. Сдвинуть вперед кнопку открытия барабана и откинуть барабан влево;
7. Вставить в отверстие в фальшпатроне инъекционный дротик ИД-06;
8. Закрывать барабан;
9. Снимите с предохранителя и произведите выстрел.

2017 г.

г. Ростов-на-Дону