






## Инструкция по заправке «летающих шприцев».

<p>1) Снять стабилизатор, удерживая его за пластиковый переходник.</p>	
<p>2) Снять колпачок с иглы</p>	
<p>3) Шприц 10-50 мл с переходником надеть вместо стабилизатора, набрать необходимое количество препарата. <u>Силиконовую втулку на игле сдвинуть, чтобы она закрыла отверстие на корпусе иглы. Таким образом заправить необходимое количество шприцев.</u></p>	
<p>4) Шприц 10-50 мл с переходником набрать полный воздуха. «Летающий шприц» держать вертикально, чтобы резинка- клапан в воздушной камере закрыла отверстие, подсоединить шприц с воздухом к отверстию воздушной камеры и закачать воздух (создать давление в камере), удерживая шток шприца-заправщика в надавленном состоянии резко отсоединить от воздушной камеры «Летающего шприца».</p>	
<p>5) Надеть стабилизатор. Шприц взведен и готов к метанию.</p>	

б) Для повторного применения необходимо стравить воздух из воздушной камеры. И перейти к пункту 1)



**Закачка воздухом производится непосредственно перед метанием!**

**Меры предосторожности:**

**«Летающий шприц» после закачки воздуха, находится во взведенном состоянии, сдвигать втулку, закрывающую отверстие в игле не рекомендуется.**

**При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, респиратор, защитные очки), а также соблюдать правила личной гигиены.**